



Sistema de Posicionamiento Estelar

Modelo: Serie BS
Serie BSK
Serie BSSK



Escanea el código QR para ver el video de instrucciones.



Versión: B/1
Fecha de lanzamiento: 14.05.2025



Importante

Estas instrucciones proporcionan información importante para el uso seguro y el mantenimiento del Sistema de Posicionamiento Estelar. Tómate el tiempo necesario para leer estas instrucciones informativas antes de usar este producto. Es muy importante seguir las instrucciones, ya que si no se usa de acuerdo con ellas, puede causar lesiones graves o la muerte al usuario.

Uso Previsto

Este producto está diseñado para proporcionar soporte y seguridad durante el reposo acostado o sentado de personas con discapacidades que puedan tener dificultades para controlar sus partes del cuerpo, sentarse erguidas o mantener el equilibrio. Este producto es para uso en interiores.

Contenido de la Paquete

Este producto viene completamente ensamblado. Solo necesitarás colocar adecuadamente el colchón básico y todos los accesorios que hayas elegido antes de usarlo. Por favor, verifica que tengas todos los accesorios que pediste.

Eliminación

Cuando un producto llegue al final de su vida útil, debe separarse por tipo de material para que las piezas puedan ser recicladas y eliminadas de manera segura.

Lista de Partes

Por favor, verifica que tengas el colchón básico y todos los accesorios opcionales que pediste. La ensambladura debe ser realizada únicamente por adultos.

Mantenimiento

Este producto debe ser inspeccionado, mantenido, limpiado y/o lavado rutinariamente. Deja de usar este producto si se daña, se rompe o se desensambla. Contacta a tu proveedor para una reparación o reemplazo calificado. No lo alteres ni lo repares personas no calificadas. Si el cliente realiza o organiza modificaciones o reparaciones sin haber obtenido primero el permiso por escrito del fabricante, la garantía del fabricante quedará nula.



Declaración de Garantía

Debe seguirse cuidadosamente el manual de uso de este producto. Es imposible eliminar todos los riesgos inherentes al uso de este producto. La garantía del fabricante permite la reparación, a menos que Beneland determine que es necesario reemplazar o devolver el producto. El período de garantía del fabricante es de 2 años, a partir de la fecha de compra indicada en el recibo de venta.

El fabricante no otorga garantías de calidad satisfactoria ni de idoneidad para un propósito específico, ni ninguna otra garantía expresa o implícita, excepto las indicadas anteriormente.

LA GARANTÍA DEL FABRICANTE QUEDARÁ NULA EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

- Si ha realizado o ha organizado reparaciones o modificaciones sin haber obtenido previamente el permiso por escrito de Beneland o del minorista.
- Los defectos resultantes de negligencia, un accidente y/o de cualquier uso o mantenimiento distinto del indicado en la guía del usuario.
- Daños al producto causados por el desgaste normal.
- Montaje o instalación incorrecta de piezas de terceros incompatibles con el producto.
- Daños inadvertidos o no intencionales, uso anormal o cuidado insuficiente.
- Almacenamiento / cuidado inadecuado del producto.
- Deformación de la tela o del espuma debido al uso diario normal del producto.
- Daños causados por reparaciones realizadas por personas no autorizadas o debido al desmontaje incorrecto del producto.
- Insatisfacción del cliente con el producto en términos de ajuste, peso, funcionalidad, color o diseño.



Advertencia

- Es esencial que los productos se inspeccionen a fondo al menos una vez al año y que sean revisados periódicamente por un profesional calificado para determinar su idoneidad para el usuario y sus necesidades. El revisor es responsable de garantizar que cualquier producto sea seguro y estable para el usuario.
- Este producto deberá ser evaluado en cuanto a la idoneidad y seguridad de todo el equipo para cada usuario únicamente por profesionales calificados.
- Nunca deje al usuario sin supervisión, especialmente si el usuario es un niño. El usuario puede resbalar, caerse o incluso quedar estrangulado cuando no esté supervisado y puede sufrir lesiones graves. Es de la única responsabilidad del cuidador garantizar la seguridad del usuario.
- No coloque el colchón en un suelo áspero e irregular, ni en una pendiente.
- Nunca permita que el usuario se levante sobre las almohadas para evitar resbalar o caerse.
- No permita que los niños se suban al interior o jueguen con la bolsa de almacenamiento.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían representar un peligro de asfixia para los niños pequeños.
- Para prevenir el riesgo de que los productos se incendien, no los coloque cerca de una fuente de calor expuesta, como cigarrillos, electricidad o fuego abierto.
- Para evitar lesiones, asegúrese de mantener al usuario alejado cuando se despliegue y pliegue este producto.
- Para evitar lesiones graves por caídas o deslizamientos en el colchón, el usuario debe utilizar siempre los accesorios. Al sujetar al usuario con cinturones, asegúrese de que haya un ancho de dedo entre el cinturón y el usuario para evitar un ajuste demasiado fuerte o que el usuario se mueva a una posición inadecuada. Y asegúrese de que el cinturón sea lo suficientemente largo para el usuario.
- No utilice el Sistema de Posicionamiento Estelar si alguna parte está rota, rasgada o faltante. Las partes dañadas o desgastadas deben ser reparadas de inmediato.
- Este producto no ha sido probado en conjunto con productos de otros fabricantes. No agregue accesorios al producto que no sean accesorios aprobados por Beneland Comfort Ltd.
- Cualquier cambio o modificación realizada por personas distintas a un técnico autorizado de Beneland Comfort Ltd. invalidará la garantía y Beneland Comfort Ltd. no asumirá ninguna responsabilidad por las lesiones o daños causados.
- Cualquier incidente grave relacionado con los productos debe ser notificado al fabricante y a la autoridad competente del país en el que se encuentra el usuario.

Configuración del Colchón

Modo Estándar del Colchón (Figura 1)

Paso 1

Abra la bolsa de almacenamiento y saque todos los accesorios y el colchón.

Paso 2

Quíte las correas del colchón y suelte el cierre, y luego coloque el colchón sobre una superficie plana.

Paso 3

Coloque todas las almohadas sobre el colchón y ajuste su posición según la condición personal y las preferencias del usuario. Pegue el lado con velcro al colchón del Sistema de Posicionamiento Estelar para asegurar que la almohada quede firmemente fijada y no se desplace.



Figura 1

Modo de Sentado del Colchón (Figura 2)

Paso 1

Abra la bolsa de almacenamiento y saque todos los accesorios y el colchón.

Paso 2

Incline el colchón hasta alcanzar el ángulo deseado. Hay una larga cinta elástica en la parte trasera del colchón (el lado completamente negro). Inserte el gancho en el orificio de inserción y gire un extremo del colchón hacia atrás a través de la ranura tri - glide en la parte inferior del colchón para ajustar el ángulo.

Paso 3

Coloque todas las almohadas sobre el colchón y ajuste su posición según la condición personal y las preferencias del usuario.



Figura 2

Sábana de Felpa (si es necesario) (Figura 3)

Paso 1

Coloque la sábana sobre el colchón y tire firmemente del cordón de cierre para asegurarlo.

Paso 2

Coloque todas las almohadas sobre la sábana de felpa y ajuste su posición según la condición personal y las preferencias del usuario. Pegue el lado con velcro a la sábana de felpa para asegurar que la almohada quede firmemente fijada y no se desplace.

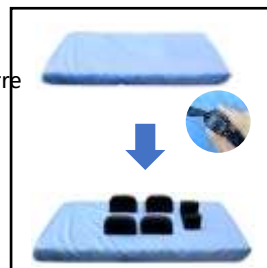


Figura 3

Fijación del Cinturón (si es necesario) (Figura 4)

Fije los cinturones al colchón mediante los lazos en ambos lados del colchón.

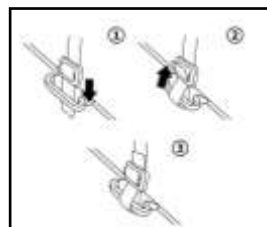


Figura 4

Plegado y almacenamiento

Paso 1



Pliegue el colchón según se muestra en la imagen.

Paso 2



Enhebre las cintas superior e inferior a través de los lazos en ambos lados.

Paso 3



Coloque la bolsa de almacenamiento sobre el colchón y cierre una de las partes de la cremallera. Tenga en cuenta que la manija debe estar orientada hacia el lado abierto.

Paso 4



Ponga todos los accesorios dentro de la bolsa y cierre la cremallera.

Limpieza

Antes de lavar, revise la etiqueta del tejido.

Colchón base	<ul style="list-style-type: none">• Limpiarlo con un paño húmedo y un detergente suave.• No utilice lejía ni limpiadores biológicos.• Se pueden utilizar aerosoles o toallas antisépticas.• Si es necesario desinfectar, límpielo con un paño húmedo impregnado en una solución desinfectante.
Fundas	<p>Incluyen la funda del colchón, la sábana de felpa, la bolsa de almacenamiento y todas las fundas de las almohadas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Antes de lavar, abrahe la cremallera de la funda.• Coloque la funda dentro de una bolsa para evitar daños en ella o en la lavadora/secadora.• Lávela en máquina a una temperatura de 40 °C o inferior con un detergente suave.• Deje secar la funda del colchón extendida a la sombra.• No la blanquee ni planche.• No la lave en seco.• NUNCA utilice la funda del colchón por sí sola sin haber instalado el colchón base.
Núcleo de la almohada	<ul style="list-style-type: none">• Limpie con un paño húmedo y un detergente suave.• No utilice lejía ni limpiadores biológicos.
Cinturones de seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Se pueden eliminar las salpicaduras leves con un paño húmedo.• Las salpicaduras deben eliminarse lo antes posible. Toca suavemente la mancha.• No mojes en exceso la mancha.• No utilices solventes orgánicos, líquidos de limpieza en seco, limpiadores abrasivos ni lejías industriales.• Se pueden usar aerosoles o toallas antisépticas.• Si es necesario desinfectar, límpielo con un paño húmedo impregnado en una solución desinfectante.

Asegúrese siempre de que los productos estén secos antes de usarlos.



Lea las instrucciones antes de usar



Uso múltiple por un solo paciente



Para uso en interiores



Marca CE



Precaución



No estéril



No planchar



No blanquear



Lavar en máquina - temperatura del agua 40 °C



No lavar en seco



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Dispositivo médico



Nombre y dirección del fabricante



Fabricante: DongGuan LeYuan Plastic & Metal Technology Co.,LTD
Dirección: Número 2 de la carretera Baoyuan, pueblo Tangxia, ciudad Dongguan, provincia de Guangdong, China
Teléfono: +86 - 076982131662

Empresa: SUNGO Europe B.V.



Dirección: Unidad 1.7, 522 Boulevard Fascinatio, 2909VA Capelle aan den IJssel, Países Bajos
Teléfono: +31(0)10 3034500; +31(0)2021 11106